

Zasady mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w służbie zdrowia

Oczyść mechanicznie większe zabrudzenia,
wstępnie umyj i spłucz.




Włóż drobne dezynfekowane przedmioty do roztworu
REMIX - UNI (stężenie 30%) w zbiorniku na ok. 15 min.
REMIX - UNI jest preparatem o pH obojętnym i należy stosować
go przemiennie ze środkiem o pH kwaśnym REMIX - SANIT.




Dezynfekcja i mycie powierzchni

Nanieś roztwór REMIX - UNI
na oczyszczone i wstępnie umyte powierzchnie.

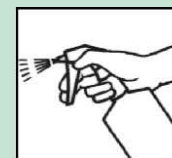

Odczekaj ok. 15 min.

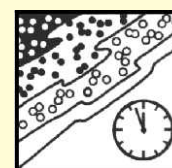

Powierzchnie mające kontakt z żywnością lub
ciałem należy spłukać wodą pitną.



Zasady bezpiecznej pracy ze środkami zawarte są na opakowaniach produktów.



www.reinex.pl